

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

La société SARL Orthopédie du Forez créée sur Saint-Etienne en 2009 est spécialisée dans la fabrication et l'application du grand appareillage. Elle confectionne et délivre des orthèses et prothèses externes sur mesure telles que corsets, minerves, corsets-sièges, verticalisateurs, prothèses du membre inférieur, orthèses du membre supérieur et inférieur (releveurs, orthèses suropédieuses et cruro-pédieuses).

ORTHOPEDIE DU
FOREZ

73 Rue de la Talaudière, 42000
Saint-Etienne



CORSET OU MINERVE

NOTICE D'UTILISATION

Vous venez de bénéficier d'un appareillage orthopédique fabriqué par un orthoprothésiste agréé sur prescription de votre médecin.

Afin de vous garantir le port de cet appareil dans des conditions optimales nous vous recommandons de lire attentivement cette notice.

Les instructions concernant le port de l'appareil ne peuvent être définies que par votre médecin prescripteur et doivent être rigoureusement respectées.



MISE EN PLACE

Pour votre confort à l'intérieur de votre appareil nous vous conseillons de le porter par-dessus un maillot de corps, de préférence ajusté et en coton.

Le corset doit être posé sur la taille et la minerve sur les épaules.

Dans le cas d'un appareil bivalve il est important que la valve antérieure soit positionnée **par-dessus** la valve postérieure.

Serrer progressivement les sangles, en commençant par celles du bas, jusqu'aux repères réalisés par votre orthoprothésiste.

En fonction de votre activité quotidienne, l'appareil peut avoir tendance à remonter vers le haut. Ne pas hésiter donc à le repositionner régulièrement sur la taille et à vérifier le serrage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI


Ne pas hésiter à prendre contact avec votre orthoprothésiste dans les cas suivants :

- Problème avec le système de fermeture.
- Rougeurs ou douleurs persistantes dues à l'appareil.
- Modification importante de votre poids.

STOCKAGE

Lorsqu'il n'est plus utilisé votre appareil doit être entreposé à l'air ambiant.

Évitez surtout de l'entreposer près d'une source de chaleur (cheminée, radiateur) ou derrière une vitre au soleil (véranda, fenêtre, voiture...) car une trop grande température risque de le déformer.

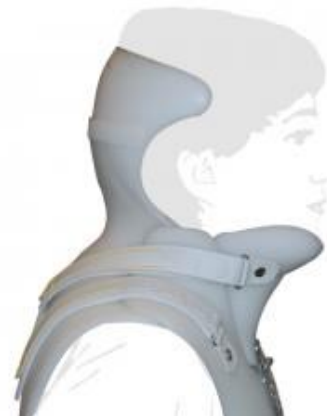

Ne pas laisser l'appareil à la portée des animaux domestiques.

HYGIENE ET ENTRETIEN

Une hygiène corporelle quotidienne permet de réduire les risques d'irritation.

Nous vous conseillons :

- De changer de maillot tous les jours.
- De nettoyer l'appareil au moins une fois par semaine (cette fréquence peut être augmentée en fonction du temps de port et de votre activité)

Plastique : Laver l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un chiffon humide et de savon de Marseille et laisser sécher.

Attention : Ne jamais chercher à accélérer le séchage (ex : sèche-cheveux) car il y a un risque de déformer l'appareil.

Les velcros : Les brosser sans les mouiller.

Contactez-nous

ORTHOPEDIE DU FOREZ
73 Rue de la Talaudière
42000, Saint-Etienne

04 77 55 03 78

orthopedieduforez@orange.fr